

Multiples Atemwegsmultipathogen-Antigen-Testkit (immunochromatographischer Test)


1. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch

2. Halten Sie eine Uhr (oder einen Wecker/Timer), Taschentücher und entweder Händedesinfektionsmittel oder Seife und warmes Wasser bereit.

3. Überprüfen Sie den Inhalt des Testkits, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt oder defekt ist.

- Für vordere Nasenabstriche.

- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Testen beginnen.

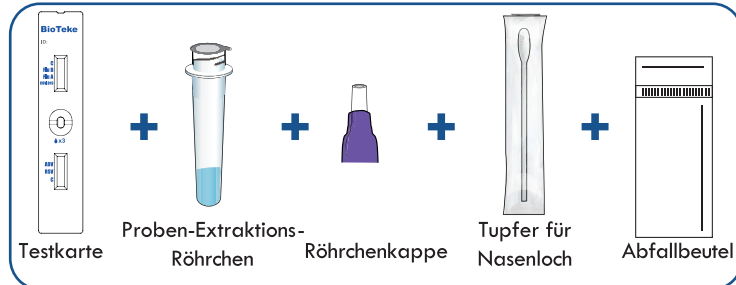

Hinweis: Testkarten, die bei niedriger Temperatur gelagert wurden, sollten vor dem Öffnen auf Raumtemperatur gebracht werden, um Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden.

Hinweis: Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien

- (1) Uhr (oder Wecker/Timer),
- (2) Taschentücher,
- (3) Händedesinfektionsmittel / Seife

1

Waschen Sie Ihre Hände mindestens 20 Sekunden gründlich, bevor Sie den Test durchführen.



2

Stellen Sie das Probenextraktionsröhrchen in den Halter der Kit-Box und ziehen Sie vorsichtig die Aluminiumfolienversiegelung ab.

3

HINWEIS: Ist die Tupferverpackung bereits geöffnet, ist der Tupfer nicht steril. NICHT verwenden!


HINWEIS: Bitte schnäuzen Sie sich die Nase, bevor Sie den Abstrich zur Probenentnahme durchführen.

Nehmen Sie den Tupfer aus der Verpackung und halten Sie ihn am Griff. Berühren Sie die Wattespitze des Tupfers nicht mit den Händen.



4


Führen Sie den Tupfer vorsichtig weniger als einen Zoll (ca. 2,5 cm) in ein Nasenloch ein. Reiben Sie den Tupfer langsam an der gesamten Innenseite Ihrer Nase entlang. Machen Sie mindestens 5 große Kreise. Drehen Sie den Tupfer nicht einfach nur. Wiederholen Sie diesen Schritt im anderen Nasenloch mit demselben Tupfer.

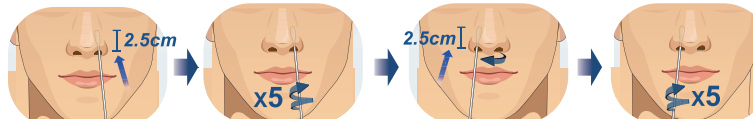

Hinweis: Bei Kindern kann die maximale Einführtiefe in das Nasenloch weniger als 3/4 Zoll (ca. 1,9 cm) betragen, bitte passen Sie dies dem Alter entsprechend an.

5

Führen Sie den Tupfer in das Probenextraktionsröhrchen ein. Berühren Sie mit der Tupferspitze den Boden des Röhrchens und rühren Sie mindestens 5-mal um. Drücken Sie den Tupfer im Probenextraktionsröhrchen mit den Fingern 5-mal gegen die Außenwand des Röhrchens.

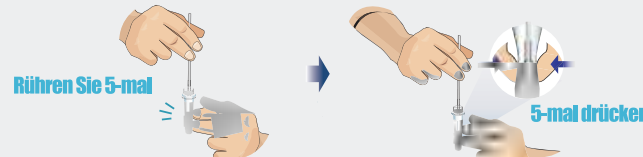


6

Entfernen Sie den Tupfer, indem Sie ihn beim Herausziehen gegen das Probenextraktionsröhrchen drehen und dabei die Seiten des Röhrchens zusammendrücken, um die Flüssigkeit aus dem Tupfer zu lösen. Entfernen Sie den Tupfer und entsorgen Sie ihn im mitgelieferten Abfallbeutel.



8

Öffnen Sie den Folienbeutel und entnehmen Sie die Testkarte. Legen Sie sie auf eine flache, trockene und saubere Oberfläche. Drehen Sie den integrierten Tropfverschluss des Probenextraktionsröhrchens um und geben Sie langsam 3 Tropfen auf die Probenvertiefung der Testkarte.

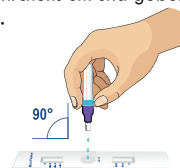

15-20 Minuten

9 Ergebnisinterpretation



HINWEIS: Die Testergebnisse dürfen nicht nach mehr als 30 Minuten abgelesen werden.



[Positiv]

SARS-CoV-2 (COVID-19) positiv: Zwei farbige Linien erscheinen im COVID19/Flu A/Flu B-Testfenster. Eine dunkelblaue/lila Linie befindet sich im Bereich (C), und eine rote Linie im Bereich (COVID19).

Influenza A (Flu A) positiv: Zwei farbige Linien erscheinen im COVID19/Flu A/Flu B-Testfenster. Eine dunkelblaue/lila Linie im Bereich (C), und eine blaue Linie im Bereich (Flu A).

Influenza B (Flu B) positiv: Zwei farbige Linien erscheinen im COVID19/Flu A/Flu B-Testfenster. Eine dunkelblaue/lila Linie im Bereich (C), und eine blaue Linie im Bereich (Flu B).

Respiratorisches Synzytialvirus (RSV) positiv: Zwei farbige Linien erscheinen im RSV/ADV-Testfenster. Eine dunkelblaue/lila Linie im Bereich (C), und eine blaue Linie im Bereich (RSV).

Adenovirus (ADV) positiv: Zwei farbige Linien erscheinen im RSV/ADV-Testfenster. Eine dunkelblaue/lila Linie im Bereich (C), und eine rote Linie im Bereich (ADV).

Mehrfach positiv: Zwei farbige (C)-Linien erscheinen in zwei separaten Fenstern. Wenn eine weitere Linie erscheint, ist der entsprechende Erreger positiv.

Hinweis: Ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie wahrscheinlich mit SARS-CoV-2 / Influenza-A-Virus / Influenza-B-Virus / Respiratorischem Synzytialvirus / Adenovirus infiziert sind.

Hinweis: Die Testergebnisse sollten immer im Zusammenhang mit klinischen Beobachtungen und epidemiologischen Daten interpretiert werden, wenn endgültige Diagnosen und Entscheidungen zum Patientenmanagement getroffen werden.




[Negativ]

Im COVID19/Flu A/Flu B/RSV/ADV-Nachweisfenster erscheinen zwei dunkelblaue/lila Linien im Bereich (C) und keine Linie im Nachweisbereich (COVID19/Flu A/Flu B/RSV/ADV). Dies zeigt an, dass SARS-CoV-2, Influenza-A-Virus, Influenza-B-Virus, Respiratorisches Synzytialvirus oder Adenovirus in der Probe nicht nachgewiesen wurden.

Ein negatives Ergebnis schließt jedoch das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2, Influenza-A-Virus, Influenza-B-Virus, Respiratorischem Synzytialvirus oder Adenovirus nicht mit absoluter Sicherheit aus und sollte nicht als alleinige Grundlage für Behandlungs- oder Patientenmanagemententscheidungen verwendet werden. Negative Ergebnisse sollten im Zusammenhang mit der jüngsten Expositionsgeschichte, der medizinischen Vorgeschichte und dem Vorliegen klinischer Anzeichen und Symptome, die mit SARS-CoV-2, Influenza-A-Virus, Influenza-B-Virus, Respiratorischem Synzytialvirus und Adenovirus übereinstimmen, betrachtet und gegebenenfalls durch einen PCR-Test zur Patientenbetreuung bestätigt werden.


[Ungültig]

Wenn eine der Kontrolllinien (C) nicht erscheint, muss der Test als ungültig gewertet werden. Ein ungültiges Testergebnis bedeutet, dass bei Ihrem Test ein Fehler aufgetreten ist und die Ergebnisse nicht interpretiert werden können. Sie müssen mit einer neuen Testkarte erneut testen.

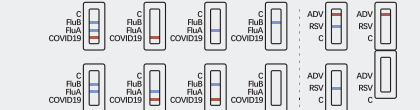

10

Alle verwendeten Testkomponenten sollten im Hausmüll entsorgt werden. Waschen Sie nach Abschluss aller Probenahme- und Testschritte Ihre Hände oder verwenden Sie Händedesinfektionsmittel.

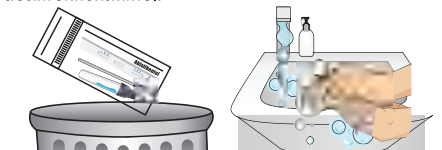



Multiples Atemwegsmultipathogen-Antigen-Testkit
(immuno-chromatographischer Test)

Telefon: (0510) 8332 3992