

Zestaw do testowania antygenów wielu patogenów układu oddechowego

(Test immunochromatograficzny)
Wyrób do samokontroli


BioTeke
INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
2. Przygotuj zegarek (lub zegar/minutnik), chusteczki oraz środek przeznaczony do dezynfekcji dłoni lub mydło i ciepłą wodę.
3. Sprawdź zawartość zestawu testowego. Upewnij się, że żaden element nie jest uszkodzony lub złamany.

-Przeznaczony do wymazu z przedniego odcinka nosa.
-Proszę ostrożnie przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do testu.

IVD

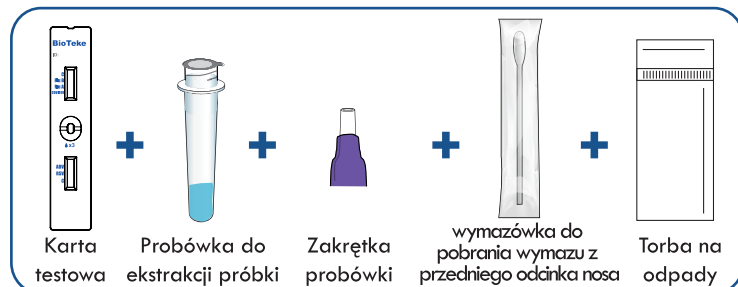

Uwaga: W celu zapobiegnięcia wchłonięciu wilgoci, przed użyciem karty testowej przechowywane w niskiej temperaturze należy przywrócić do temperatury pokojowej.

- Uwaga: Materiały wymagane, lecz niedołączone
- (1) Zegarek (lub zegar/minutnik),
 - (2) Chusteczki,
 - (3) Środek przeznaczony do dezynfekcji dłoni / mydło.



2


Umieść probówkę w uchwycie zestawu, a następnie zdejmij plombę wykonaną z folii aluminiowej.

3

UWAGA: Jeśli opakowanie wymazówki jest otwarte, to nie jest jalone i NIE NALEŻY go używać!


UWAGA: Przed zebraniem próbki proszę wydmuchać nos.

Wyjmij wymazówkę z opakowania trzymając za uchwyt. Uważaj, aby nie dotknąć swoimi dłońmi końcówki wymazówki z tkaniny.

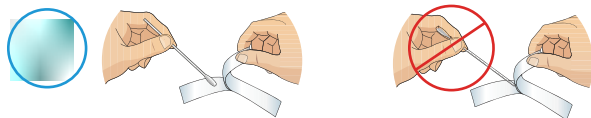

4


Delikatnie włóż wymazówkę do Twojego nozdrza na głębokość mniejszą niż 1 cal (około 2,5 cm). Powoli pocieraj wymazówkę o wszystkie wewnętrzne ścianki swojego nozdrza. Wykonaj przynajmniej 5 pełnych obrotów. Powtórz niniejszy krok w Twoim drugim nozdrzu przy użyciu tej samej wymazówki.

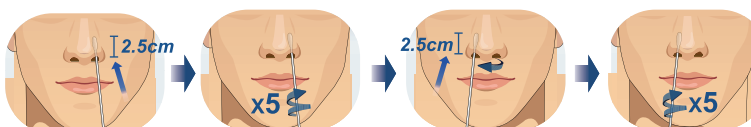

UWAGA: W przypadku dzieci maksymalna głębokość wprowadzenia do nozdrza może wynosić mniej niż 3/4 cala (około 1,9 cm).


5

Umieść wymazówkę w próbce. Dotknij dna próbki za pomocą końcówki wymazówki i zamieszaj przynajmniej 5 razy. Użyj palca pięć razy, aby wycisnąć wymazówkę do próbki przez zewnętrzną ściankę próbki.

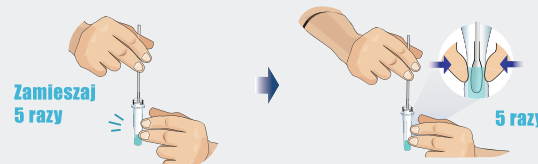


6

Wyjmij wymazówkę obracając ją o probówkę, jednocześnie ściskając ścianki próbki w celu wyzwolenia płynu z wymazówki. Wyjmij i wyrzuć wymazówkę do dostarczonej torby na odpady.

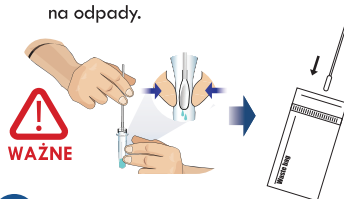


7

Zakręć fioletową nakrętkę próbki na probówkę, a następnie odkręć górną białą nakrętkę.

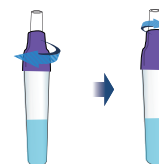

8

Otwórz worek i wyjmij kartę testową. Umieść ją na płaskiej, suchej oraz czystej powierzchni. Odwróć zintegrowany zakraplacz do góry nogami, a następnie powoli wyciśnij 3 krople do studzienki na próbkę na karcie testowej.

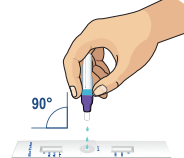

WAŻNE
15-20 minut

9 Interpretacja wyników

UWAGA:

Wyniki testu nie powinny być odczytywane po upływie 30 minut.



[Pozytywny]

Wynik pozytywny na SARS-CoV-2 (COVID 19): Dwie kolorowe linie pojawiają się w oknie testowym COVID-19/Flu A/Flu B. Ciemnoniebieska / purpurowa linia w sekcji (C) oraz czerwona linia w sekcji (COVID-19).

Pozytywny wynik na wirusa grypy A (Flu A): Dwie kolorowe linie pojawiają się w oknie testowym COVID-19/Flu A/Flu B. Ciemnoniebieska / purpurowa linia w sekcji (C) oraz niebieska linia w sekcji (grypa A).

Pozytywny wynik na wirusa grypy B (Flu B): Dwie kolorowe linie pojawiają się w oknie testowym COVID-19/Flu A/Flu B. Ciemnoniebieska / purpurowa linia w sekcji (C) oraz niebieska linia w sekcji (grypa B).

Pozytywny wynik na syncytialnego wirusa oddechowego (RSV): Dwie kolorowe linie pojawiają się w oknie testowym RSV / ADV. Ciemnoniebieska / purpurowa linia w sekcji (C) oraz niebieska linia w sekcji (RSV).

Pozytywny wynik na adenowirus (ADV): Dwie kolorowe linie pojawiają się w oknie testowym RSV / ADV. Ciemnoniebieska / purpurowa linia w sekcji (C) oraz czerwona linia w sekcji (ADV).

Wiele pozytywnych wyników: Dwie kolorowe (C) linie pojawiają się w dwóch osobnych oknach. W przypadku, gdy inna linia się pojawia, oznacza to, że odpowiedni patogen jest pozytywny.


Uwaga: pozytywny wynik oznacza, że prawdopodobnie zostałeś zarażony SARS-CoV-2 / wirusem grypy A / wirusem grypy B / syncytialnym wirusem oddechowym / Adenowirusem. Wyniki testu należy zawsze brać pod uwagę w kontekście obserwacji klinicznych i danych epidemiologicznych w trakcie stawiania ostatecznej diagnozy i podejmowania decyzji związanych z pacjentem.



[Negatywny]

W oknie wykrywania COVID-19/Flu A/Flu B/RSV/ADV, dwie ciemnoniebieskie / purpurowe linie pojawiające się w sekcji (C) oraz brak linii pojawiającej się w obszarze wykrywania (COVID-19/Flu A/Flu B/RSV/ADV). To wskazuje, że wirus SARS-CoV-2, wirus grypy A, wirus grypy B, syncytialnego wirusa oddechowego lub adenowirus nie został wykryty w próbce. Jednakże negatywny wynik nie wyklucza obecności infekcji SARS-CoV-2, wirusa grypy A, wirusa grypy B, syncytialnego wirusa oddechowego, adenowirusa i nie może stanowić wyłącznej podstawy leczenia lub podejmowania decyzji związanych z pacjentem.


Negatywne wyniki powinny być rozpatrywane w kontekście historii niedawnego narażenia jednostki, dotychczasowego wywiadu oraz obecności objawów przedmiotowych i podmiotowych zgodnych z SARS-CoV-2, wirusem grypy A, wirusem grypy B, syncytialnym wirusem oddechowym, adenowirusem oraz potwierdzone testem PCR w przypadku, gdy jest to konieczne w celu podejmowania decyzji związanych z postępowaniem z pacjentem.

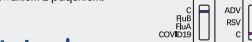

[Wynik nieważny]

W przypadku, gdy żadna z linii kontrolnych (C) się nie pojawi, to test uznaje się za nieważny.

Nieprawidłowy wynik testu oznacza, że doszło do błędów w Twoim teście i wyniki nie mogą zostać zinterpretowane. Będziesz musiał ponowić test przy użyciu nowej karty testowej.

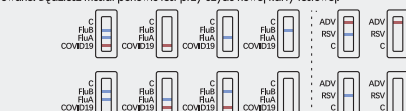

10

Wszystkie wykorzystane elementy składowe testu powinny zostać wyrzucone w dostarczonej torbie na odpady. Po zakończeniu wszystkich kroków umyj dłonie lub skorzystaj ze środka do dezynfekcji dłoni.

